

Bewaarcondities urine collecties

| Analyses | Bewaarcondities | | | Aanzuurmiddel/bewaar middel | | | | | | Bewaarcondities | Bewaartermijn |
|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|--------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | 20-25°C | 2-8°C | -20°C | HCl | Thymol | Tolueen (extern) | H ₂ SO ₄ | Ander medium | Niet aangezuurd, geen additief | | |
| Cortisol | | | x | | | | | | x | invriezen | 14 dagen |
| Aldosterone | | | x | | | | | | x | invriezen | 14 dagen |
| VMA | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| Metanefrine | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| 5-HIAA | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| Normetanefrine | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| HVA | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| Adrenaline | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| Noradrenaline | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| Dopamine | | x | | | | | x | | | koelkast | 28 dagen |
| Al | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Cadmium | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Cu | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Zn | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Jood | | x | | | | | | | x | koelkast | 14 dagen |
| Co | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Cr | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Andere metalen | | x | | | | | | | x | koelkast | 28 dagen |
| Citroenzuur | | x | | | x | | | | | koelkast | 14 dagen |
| Oxaalzuur | | x | | | x | x | | | | koelkast | 14 dagen |
| Cysteïne | | | x | | x | | | | x | invriezen | 14 dagen |
| Delta aminolevulinezuur | | | x | | | | | | x | invriezen | 14 dagen |
| Porfobilinogeen | | | x | | | | | | x | invriezen | 56 dagen |
| Coproporfyrines* | | | x | | | | | | x | invriezen | 56 dagen |
| Uroporfyrines | | | x | | | | | | x | invriezen | 56 dagen |
| Alfa-1-microglobuline | | x | | | x | x | | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 8 dagen |
| Alfa-2-macroglobuline | | | x | | x | x | | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 8 dagen |
| Natrium | | x | | x | x | x | x | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 14 dagen |
| Kalium | | x | | x | x | x | x | mag op alles | x | koelkast | 14 dagen |
| Chloor | | x | | | x | x | | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 14 dagen |
| Fosfor | | x | | x | x | x | x | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 14 dagen |

Bewaarcondities urine collecties

| Analyses | Bewaarcondities | | | Aanzuurmiddel/bewaar middel | | | | | | Bewaarcondities | Bewaartermijn |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------|--------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | 20-25°C | 2-8°C | -20°C | HCl | Thymol | Tolueen (extern) | H ₂ SO ₄ | Ander medium | Niet aangezuurd, geen additief | | |
| Calcium | | x | | x | x | x | x | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 14 dagen |
| Glucose | | x | | x | x | x | x | boorzuur, azijnzuur | x | koelkast | 7 dagen |
| Totaal eiwit | | x | | | x | x | | boorzuur | x | koelkast | 7 dagen |
| Ureum | | x | | x | x | x | x | mag op alles | x | koelkast | 14 dagen |
| Urinezuur | | x | | | x | x | | boorzuur | x | koelkast | 14 dagen |
| Creatinine | | x | | x | x | x | x | mag op alles | x | koelkast | 30 dagen |
| Urine test strip analyse | | x | | | | | | | x | koelkast | 48 uur |

*Minimum 30 mL nodig voor analyse

Legende:

■ = Procedure binnen UZ Gent ■ = niet standaard, maar wel toegelaten